



Szanowni Państwo,

informujemy, że niedawno wysłaliśmy Państwu najnowszą aktualizację (wersja oprogramowania **2.10**) do analizatora SNAP Pro* za pośrednictwem IDEXX SmartService* Solutions.

Aktualizacje oprogramowania zapewniają, że analizatory IDEXX generują spójne i dokładne wyniki, na których można polegać. Ważne jest, aby dokonać aktualizacji w jak najszybszym czasie.

Aby zaktualizować analizator:

Uwaga: proces aktualizacji trwa mniej niż 6 minut.

1. Zrestartować analizator SNAP Pro (wyłączyć i włączyć go ponownie za pomocą przycisku zasilania).
2. Upewnić się, że poziom baterii na analizatorze pokazuje 75% lub 100% mocy, a następnie podłączyć analizator do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
3. Dotknąć okrągłej niebieskiej ikony z obracającą się białą strzałką, która znajduje się obok ikony baterii w prawym górnym rogu ekranu.
4. Dotknąć opcji **Yes** (Tak), aby kontynuować instalację.
5. Po wyświetleniu monitu dotknąć opcji **Restart** (Uruchom ponownie). Analizator uruchomi się ponownie i będzie gotowy do użycia, kiedy pojawi się ekran główny.

Uwaga: w trakcie procesu aktualizacji ekran i dioda stanu mogą się kilkakrotnie wyłączać i włączać.

6. Aby potwierdzić, że oprogramowanie zostało pomyślnie zaktualizowane, należy dotknąć opcji **More** (Więcej) u dołu ekranu głównego, potem opcji **About SNAP Pro** (Informacje o SNAP Pro), a następnie potwierdzić, że wersja oprogramowania to 2.10.0. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy IDEXX.

Cieszymy się, że możemy dostarczać Państwu innowacyjne produkty i usługi, które pozwalają Państwu świadczyć wysokiej jakości usługi i rozwijać swoją działalność. W razie jakichkolwiek pytań związanych z aktualizacją należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy IDEXX.

Z poważaniem

Cameron Wise

kierownik produktu SNAP Pro*

Dział pomocy technicznej firmy IDEXX

Europa idexx.eu

Polska 48 223062477

Republika Czeska 420-239018034

Słowacja 421-268622417