Reinigung Ihres Analysegeräts


Um die optimale Leistung Ihres Urinsediment-Analysegeräts SediVue Dx* sicherzustellen, wird empfohlen, dass Sie die inwendigen Komponenten des Analysegeräts monatlich reinigen. Wenn eine Kartusche überfüllt oder nicht ordnungsgemäß befüllt wurde, ist ebenfalls eine Reinigung erforderlich, um zu verhindern, dass überschüssiges Probenmaterial die beweglichen Teile des Analysegeräts verunreinigt. Durch die regelmäßige Reinigung des Analysegeräts werden Fehler bei der Kartuschenbewegung reduziert und die Leistung des Analysegeräts optimiert.

Hinweis: Zur Durchführung von routinemäßigen und vorbeugenden Wartungsmaßnahmen benötigen Sie Alkoholtupfer und optische Reinigungstücher. Brauchen Sie mehr? Bestellen Sie diese Artikel kostenlos unter order.idexx.com und wähle "Germany" aus der Dropdown-Liste der Länder.


Reinigung, wenn eine Kartusche überfüllt oder nicht ordnungsgemäß befüllt

Wenn Sie feststellen, dass die Kartusche unsachgemäß befüllt wurde, erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie **die Start-Taste nicht betätigen, da sonst Urin zu den inwendigen Komponenten des Analysegeräts befördert wird**. Folgen Sie stattdessen den nachfolgenden Anweisungen.


Hinweis: Haben Sie bereits auf die Start-Taste gedrückt? Folgen Sie den Anweisungen auf der Rückseite, um die inwendigen Komponenten des Analysegeräts zu reinigen.

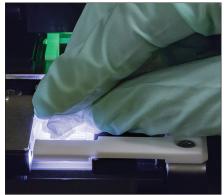

 Die Tür des Analysegeräts öffnen. Handschuhe anziehen und den Urin auf der Kartusche mit einem optischen Reinigungstuch aufsaugen.

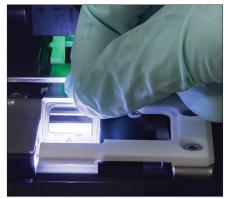

2. Kartusche herausnehmen und entsorgen.

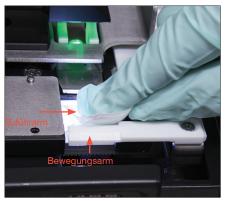

 Den Zuführarm (Eingabebereich) sowie die Vorderseite des Bewegungsarms mit einem frischen Alkoholtupfer reinigen. Die Komponenten anschließend mit einem optischen Reinigungstuch trocknen.



4. Die Tür des Analysegeräts schließen. Sobald das SediVue-Dx-Symbol den grünen "Bereitschafts"-Status anzeigt, können Sie das Patientensymbol im Hauptmenü der IDEXX VetLab* Station und dann **Durchlauf beginnen** antippen. Eine neue Kartusche wird in das Messfenster eingesetzt. **Hinweis:** Wenn es bei Ihrem Analysegerät zu mehreren Fehlern bei der Kartuschenbewegung kommt, sind möglicherweise andere Reinigungsschritte erforderlich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Technischen Kundendienst von IDEXX:

Österreich: 43 (0)1 206 092 729

Deutschland: 49 (0)69 153 253 290

Italien: 39 02 87 10 36 76

Luxemburg: 352 (0)34 20 80 87 22

Reinigung der inwendigen Komponenten (monatlich oder je nach Bedarf auch häufiger)


WICHTIG: Bis die auf dem Bildschirm angezeigte Reinigungsanleitung in einem der nächsten Software-Updates aktualisiert wird, folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen zur Reinigung Ihres Analysegeräts.



Das SediVue DxSymbol im Hauptmenü
der IDEXX VetLab Station
antippen, dann SediVue
Dx ausschalten
und schließlich
Herunterfahren
antippen.



 Die Tür des Analysegeräts öffnen und Oberwie Unterseite des Messfensters mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten optischen Reinigungstuch reinigen. Anschließend mit einem trockenen optischen Reinigungstuch trocknen.

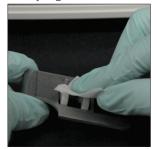

 Den Kartuschenhalter entfernen, mit einem Alkoholtupfer reinigen, mit einem optischen Reinigungstuch trocknen und anschließend beiseitestellen.




4. Reinigen Sie die linke Seite des Schieberarms fünf Mal mit einem Alkoholtupfer (stellen Sie sicher, dass die rechte Kante der Führung vollständig gereinigt ist), und trocknen Sie sie dann mit einem optischen Reinigungstuc.



 Den Schieberhebel nach links schieben und Schritt 4 auf der rechten Seite des Schieberarms wiederholen.



6a. Die Umrandung des Optikfensters und die Führung mit einem frischen Alkoholtupfer mehrfach reinigen, um sämtliche Verschmutzungen zu entfernen. Anschließend mit einem optischen Reinigungstuch trocknen.

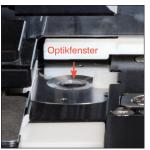

6b. Das Optikfenster mit einem frischen Alkoholtupfer in kreisförmiger Bewegung (3- bis 4-mal) abwischen und anschließend mit einem optischen Reinigungstuch trocknen.




7. Die Schutzabdeckung der Zentrifuge, den Abfallbehälter und die Tropfschale entfernen, mit warmem Wasser reinigen und anschließend mit einem optischen Reinigungstuch trocknen.

Hinweis: Üben Sie nicht allzu starken Druck auf das Optikfenster aus.



 Den Bewegungsarm mit einem frischen Alkoholtupfer reinigen und anschließend mit einem optischen Reinigungstuch trocknen.

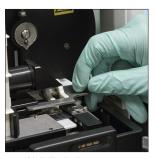

 Abfallbehälter, Tropfschale, Schutzabdeckung der Zentrifuge und Kartuschenhalter an der richtigen Stelle wieder in das Analysegerät einsetzen.



Die Tür des
 Analysegeräts schließen.
 Sobald das SediVue
 Dx-Symbol den
 grünen "Bereit"-Status
 anzeigt, können Sie
 das Patientensymbol
 im Hauptmenü der
 IDEXX VetLab* Station
 und dann, Durchlauf
 beginnen antippen.



© 2017 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • 06-0008294-00 *SediVue Dx und IDEXX VetLab sind Marken oder eingetragene Marken von IDEXX Laboratories, Inc. oder von Tochtergesellschaften des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

